

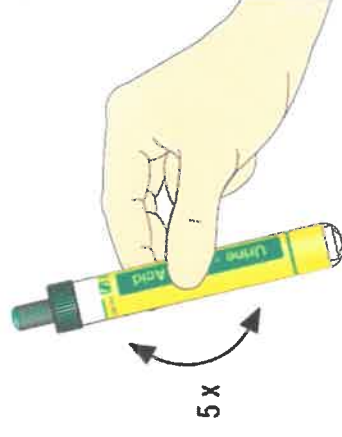
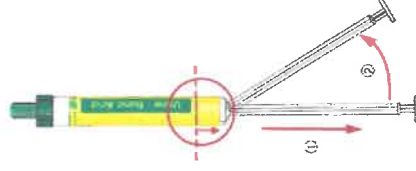


Prélèvement des Urines sur sonde

Utilisation avec le système par aspiration

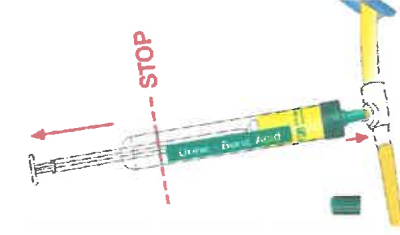

Pour les urines sur sondes uniquement :
Un seul tube vert correctement rempli : minimum **8 ml** et maximum **10 ml**
Délai d'acheminement **maximum** de 12h

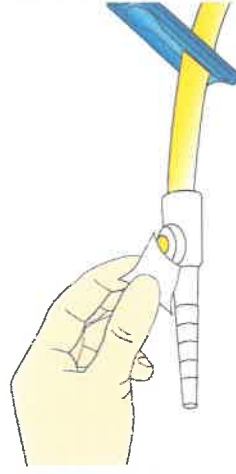

A partir d'une sonde avec système par aspiration et après avoir identifié le patient.

Clamper la tubulure. Vérifier la présence d'urine dans la tubulure. Désinfecter le site de prélèvement selon le protocole recommandé.

Retirer le bouchon. Percer la membrane avec l'embout Luer de la Monovette® Urine, ou avec une aiguille. Tirer doucement le piston jusqu'à atteindre la graduation limite au bout du tube. Déconnecter le tube, tirer le piston jusqu'au bout et le casser. Replacer le bouchon.

Vérifier le niveau de remplissage. Homogénéiser la Monovette® Urine, puis transmettre au laboratoire selon les recommandations de l'établissement.

CHU
CAEN NORMANDIE

 **SARSTEDT**