



Personnel concerné :

- Biologistes et techniciens du laboratoire d'hématologie niveau 3
- Chirugiens et personnel du service d'ophtalmologie

Matériel nécessaire pour la congélation (fourni par le laboratoire d'hématologie):

Microtube spécial pour congélation (cryovial de 1,8 ml) + feutre indélébile pointe fine + sac de transport d'échantillon ISOBAG contenant une boîte isotherme remplie de carboglace.

Mettre des gants de protection pour manipuler la carboglace (température = -70°C).

Ne pas fermer hermétiquement la boîte.

Etapes à suivre :

1. Service d'ophtalmologie :

► Dès connaissance de la date opératoire prendre rendez-vous par courriel : salaun-v@chu-caen.fr copie à truquet-f@chu-caen.fr et cornet-e@chu-caen.fr pour réserver la carboglace. L'horaire de l'intervention doit de préférence se situer en début de matinée pour assurer une prise en charge optimale du prélèvement au laboratoire.

Référent service ophtalmologie : Dr Marie LAVILLE laville-m@chu-caen.fr
Téléphone poste infirmier UF1540 : 60 93

► Le matin de l'intervention : venir chercher au laboratoire d'hématologie pièce 03-862 l'isobag contenant la boîte de carboglace + cryovial + feutre indélébile.

► **Immédiatement** après la réalisation du prélèvement :

- Transférer le prélèvement dans le microtube
- Identifier le microtube en utilisant le feutre indélébile :
Nom et prénom du patient, type de prélèvement, date du prélèvement
- Placer le cryovial dans la carboglace.
- Remplir la feuille de renseignements « DOSAGE DES CYTOKINES IL-10 et IL-6 par cytométrie en flux » disponible dans le manuel de prélèvement, fiche « CYTOKINES IL-6 ET IL-10 HUMEUR AQUEUSE, VITRE »

► Rapporter l'isobag contenant l'échantillon congelé dans la carboglace + feuille de renseignements remplie au laboratoire d'hématologie pièce 03-862.

Référents **laboratoire** : Dr SALAUN Véronique poste 45 64, Dr CORNET Edouard poste 48 59, Dr TRUQUET Florence poste 54 93

2. Laboratoire d'hématologie :

Localisation boîte carboglace : pièce 03-871-02 en bas du congélateur ref 03-871-02 CF

Localisation ISOBAG : pièce 03-863

Dès la réception du prélèvement congelé dans la carboglace :

Transférer le prélèvement dans la boîte identifiée « envoi IL6 IL10 », **localisée dans le congélateur ref CGN8 compartiment supérieur, premier niveau.**



Envoyer le prélèvement congelé en carboglace :

HOPITAL PITIE SALPETRIERE
Centre d'Ecologie Cellulaire (sortie rue Bruant)
Dr LE GARFF-TAVERNIER
47-83 Bd de l'hôpital
75013 PARIS

Tel : 01 42 16 01 92 Fax : 01 42 16 01 61

LA VERSION ÉLECTRONIQUE FAIT FOI